



# Protección personal

---

Procedimiento para la postura de mascarilla N95





Protección personal


# Procedimiento para la postura de mascarilla N95

## Mascarilla N95

La mascarilla N95 es de uso exclusivo para procedimientos generadores de aerosoles.

Para su postura:

- Sujetar la mascarilla **con la palma de la mano**.
- Colocar la mascarilla en el rostro **con la pieza nasal hacia arriba**.

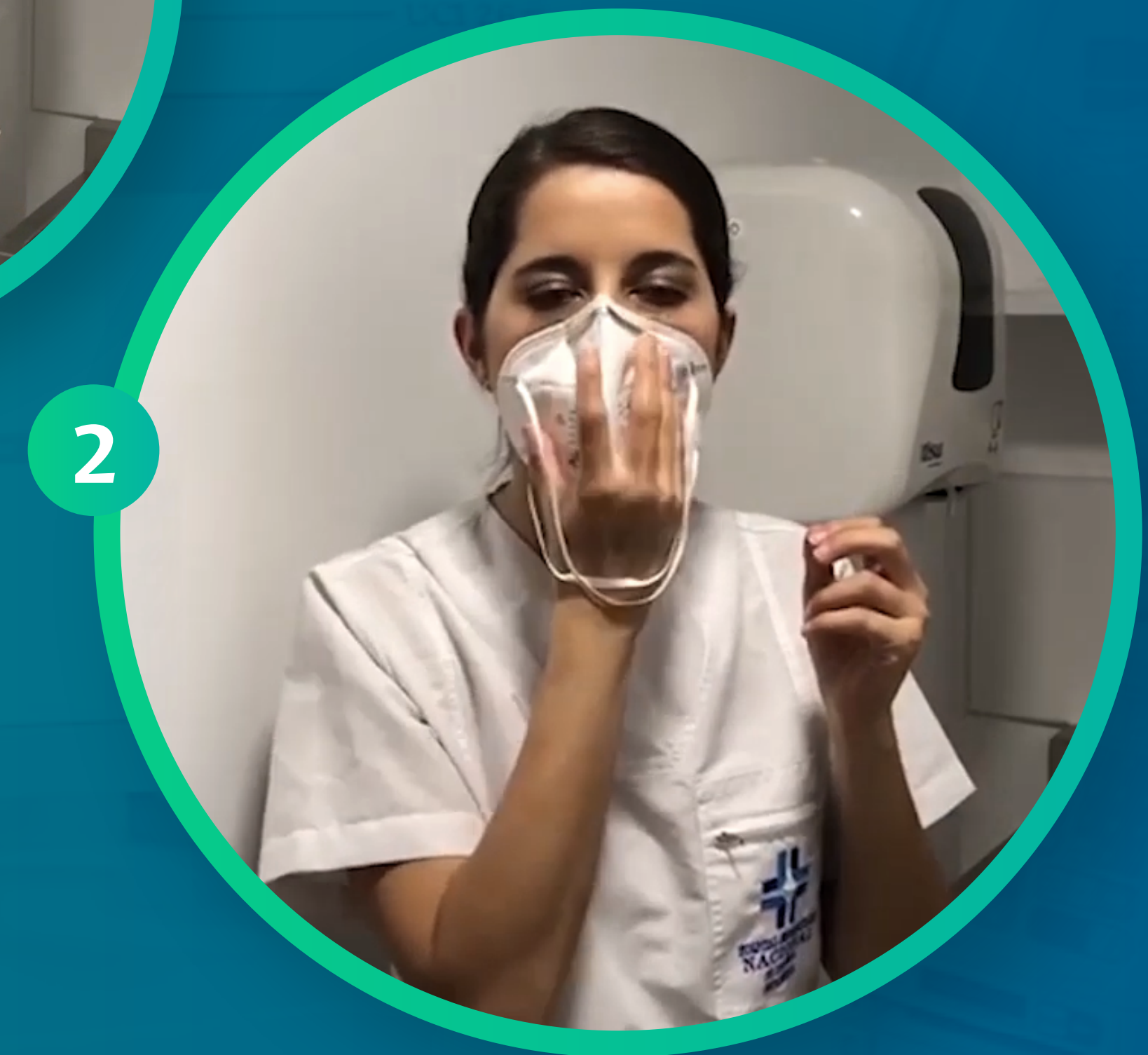



Protección personal

# Procedimiento para la postura de mascarilla N95

## Mascarilla N95

Para su postura:

- La correa inferior sobre la cabeza **va a la altura de su cuello.**
- La correa superior sobre la cabeza **va a la altura de las orejas.**







Protección personal

# Procedimiento para la postura de mascarilla N95

## Mascarilla N95

Para finalizar, **ajustar la mascarilla con los índices medios de ambas manos** haciendo presión sobre la nariz.







Protección personal

# Procedimiento para la postura de mascarilla N95

## Mascarilla N95

Es necesario realizar pruebas de cierre a la mascarilla N95.

Para esto, inhale y exhale.

- Positiva: **exhalar bruscamente**. Si hay pérdida de presión ajuste la posición o las cintas de tensión.
- Negativa: **inhale profundamente**. Si no hay pérdidas, el respirador se ajustará a su cara.

Repetir los pasos hasta que estén correctos.

